

Predator IXO protector

Praktická souprava na vytahování klíšťat obsahuje:

- sprej, který okamžitě klíště paralyzuje a znemožní mu jakékoliv další působení v ráně
- pinzetu k odstranění klíštěte

Přísáté klíště postříkejte a nechte působit asi jednu minutu (klíště zmrazí), poté uchopte klíště tak, abyste ho mírným vikláním odstranili bez poškození. Po vytažení klíštěte opět postříkejte ranku. Pinzetu také postříkejte, tím ji vyčistíte a vydesinfikujete.

Pokud si chcete být jisti, že klíště je, či není infikované, obraťte se s vytaženým klíštětem na příslušnou Hygienickou stanici, kde vám sdělí další postup. Zejména u dětí a starších osob nepodceňujte jakýkoliv nález přísátého klíštěte. Chráníte si své zdraví.

Správný postup při vytahování klíštěte:

- 1-2x stříkněte na klíště ze vzdálenosti cca 2-3 cm
- hroty pinzety uchopte klíště těsně u kůže a kývavým pohybem klíště uvolněte z rány
- následně opět použijte sprej a desinfikujte ránu

Účinná látka: Methylal

Dávkování: dle potřeby.